

SCHNGEN
PROTECTING LIFE




VERBRENNUNGEN WIRKSAM KÜHLEN
HERVORRAGENDE VERSORGUNG ALLER VERBRENNUNGEN

EINE **VERBRENNUNG**
PASSIERT IN SEKUNDEN,
DIE FOLGEN **FALSCHER**
BEHANDLUNG KÖNNEN
EIN LEBEN LANG
BEGLEITEN






EINTEILUNG DER VERBRENNUNGSGRAD E

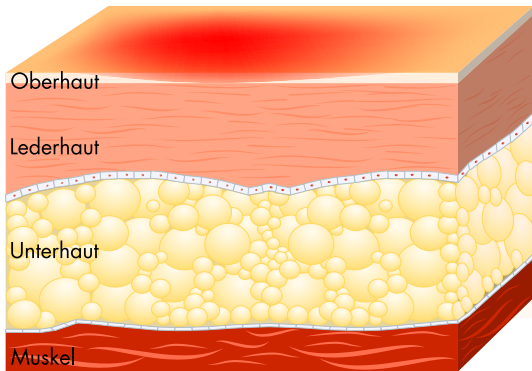

1. GRAD:

NUR OBERE HAUTSCHICHT GESCHÄDIGT


- Sehr schmerzhaft, mit Hautrötung und Blasenbildung
- In der Regel zufriedenstellende Abheilung mit geringer oder keiner Narbenbildung

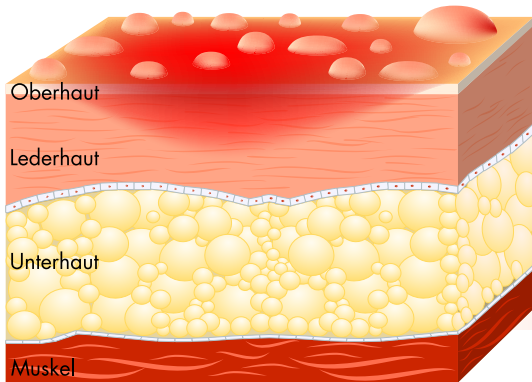

2. GRAD:

OBERE UND MITTLERE HAUTSCHICHT GESCHÄDIGT

- Kontakt mit heißen Flüssigkeiten, Flammen oder Chemikalien
- Starke Schmerzen, Verfärbung der Haut und Blasenbildung
- Nässende und fleckige Haut

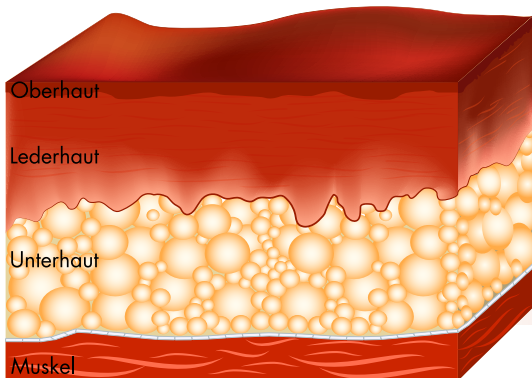


3. GRAD:

ALLE HAUTSCHICHTEN BIS ZUR UNTERHAUT GESCHÄDIGT


- Direkter Kontakt mit Flammen oder heißen Flüssigkeiten
- Entstehung von weißer, ledriger, verkohlter und trockener Haut
- Zerstörung von Haarfollikeln, Blutgefäßen und Nervenendigungen

BURNSHIELD IN AKTION

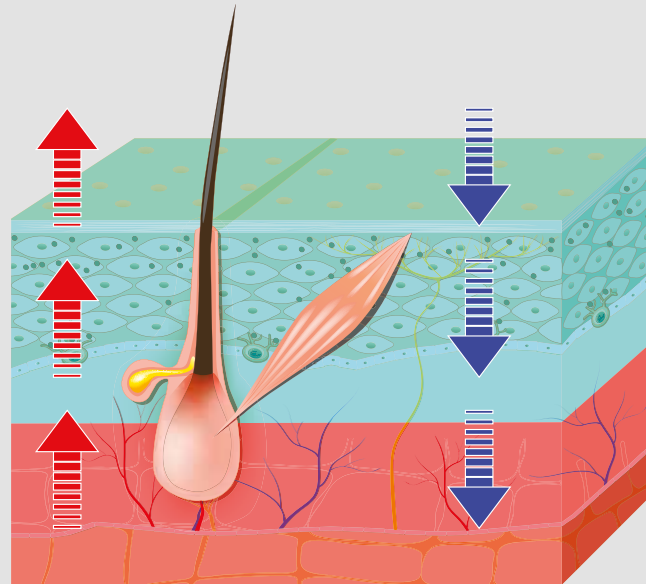

KEY FEATURES:

- Die Wärme wird aufgenommen und durch die Gelstruktur im Gewebe verteilt.
- Die Kühlung wird durch Hitzetransfer und Verdunstung erzielt.
- Der hohe Wasseranteil im Gel unterstützt eine rasche Abkühlung, was Hautschädigungen minimiert.

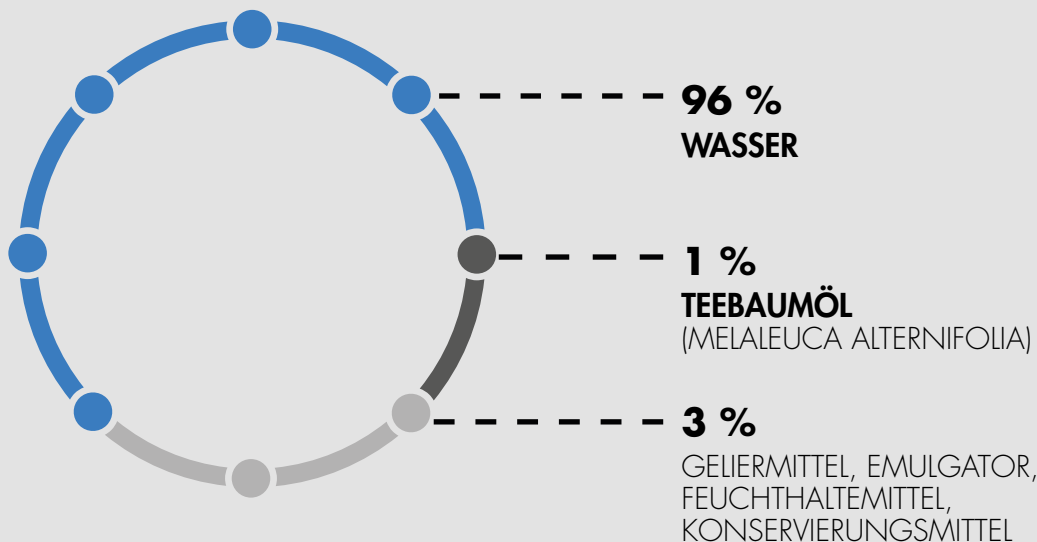

KEY FEATURES:

- **Wärme wird aufgenommen und abgeleitet**

Durch seine Gelstruktur nimmt Burnshield die Hitze rasch auf, baut sie im betroffenen Gewebe ab und minimiert so Verbrennungsschäden.

- **Kühlt und beruhigt**

Der hohe Wasseranteil von Burnshield leitet die Hitze mittels Verdunstung effektiv ab und bietet so wirksame Kühlung, was Schmerzen und Schocksymptome mindert.

- **Burnshield Gel ist ein weißes bis cremefarbenes Gel, das nach dem Auftragen klar wird**

Erleichtert die Wundbeurteilung

- **Auch für Kinder geeignet**

- **Hochwirksam in den ersten 24 Stunden**

- **Nicht haftend**

- **Nicht toxisch**

- **Nicht reizend**

- **Die Produkte werden mittels Gammastrahlung sterilisiert.**

- **Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar**

**BURNSHIELD EIGNET
SICH FÜR ALLE
ARTEN VON VER-
BRENNUNGEN:**



BRANDWUNDEN



**HITZEVERBRENNUNGEN
UND VERBRÜHUNGEN**



VERÄTZUNGEN



**STRAHLEN-
VERBRENNUNGEN**



STROMUNFÄLLE



KOMPRESSEN

In sterilem Burnshield Trauma-Hydrogel getränkte Schaumstoffkomresse im Folienbeutel. Burnshield eignet sich für leichtere Verbrennungen und Verbrühungen. Mit seinem hohen Wasseranteil kühlt und beruhigt das Burnshield Hydrogel durch die Aufnahme und Ableitung der Hitze, was Hautschädigungen minimiert. Burnshield Gel ist ein weißes bis cremefarbenes Gel, das nach dem Auftragen klar wird. Dies ermöglicht die Überwachung des Wundverlaufs. Es haftet nicht an und verklebt nicht mit der Wunde. Es ist nicht toxisch, nicht reizend und auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.

- **Ableitung der Hitze**
- **Anpassung an den Wundbereich**
- **Faserloser, elastischer, offenporiger Schaumstoff**
- **Wundschutz**
- **Gelbindung**



Burnshield Komresse

100 × 100 mm

10 12 280

Burnshield Komresse

200 × 200 mm

10 12 281

Burnshield Komresse Gesichtsmaske

200 × 450 mm

10 12 282

Burnshield Komresse

600 × 400 mm

10 12 283

Dieses Produkt ist in 8 Standardsprachen erhältlich. Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch

HYDROGEL / BRANDGEL

Burnshield ist ein steriles Trauma-Hydrogel, das sich für leichtere Verbrennungen und Verbrühungen eignet. Mit seinem hohen Wasseranteil kühlt und beruhigt das Burnshield Hydrogel durch die Aufnahme und Ab-
leitung der Hitze, was Hautschädigungen minimiert. Burnshield Gel ist ein weißes bis cremefarbenes Gel, das nach dem Auftragen klar wird. Dies ermöglicht die Überwachung des Wundverlaufs. Es haftet nicht an und verklebt nicht mit der Wunde. Es ist nicht toxisch, nicht reizend und auch für die Anwendung bei Kindern geeignet.

Burnshield Hydrogel-Beutel

3,5 ml

10 12 284

Burnshield Hydrogel

Sprühflasche 125 ml

10 12 285

Burnshield Hydrogel

Sprühflasche 75 ml

10 12 286

Burnshield Hydrogel

Spritzflasche 50 ml

10 12 287

Burnshield Hydrogel

Tube 25 ml

10 12 288



BURNSHIELD KITS

Dieses spezielle Verbrennungssets wurde entwickelt, um maximale Effizienz in Bereichen zu gewährleisten, in denen Verbrennungen eine wesentliche Gefahr darstellen. Mobil, professionell und umfangreich.

- Material: Nylontasche
- Burnshield Responder Kit: mit herausnehmbaren Einzelbeuteln

Burnshield Emergency Kit

Maße: 140 mm × 70 mm × 240 mm

10 12 291

Burnshield Rescue Burn Kit

Maße: 145 mm × 115 mm × 320 mm

10 12 289

Burnshield Responder Kit

Maße: 320 mm × 130 mm × 250 mm

10 12 290





BURNSHIELD KITS

INHALT	Emergency Kit 10 12 291	Rescue Burn Kit 10 12 289	Responder Kit 10 12 290
Burnshield Kompressen in verschiedenen Größen	3	6	13
Burnshield Binden in verschiedenen Größen	4	2	5
Burnshield Hydrogel-Spray 125 ml	1	1	3
Burnshield Burn Blott Sacht 3,5 ml	10	-	-
Elast.-Binde 4 m x 6 cm	-	2	2
SÖHNGEN® Silk 5 m x 1,25 cm	1	1	1
Cederroth Soft Foam Bandage Blue 40	1	1	4
Handschuhe 4er Set	-	1	2
Verbandkastenschere 14,5 cm	-	1	1
SIRIUS® Rettungsdecke klein 160 x 120 cm	-	1	1
Sicherheitsplombe	1	1	1
Einmalspritze 20ml	-	-	1



SÖHNGEN
PROTECTING LIFE

W.Söhngen GmbH

Postfach 1554
65223 Taunusstein

TEL: +49 6128 873-0
FAX: +49 6128 84084
E-Mail: info@soehngen.com
Web: www.soehngen.com

© W.Söhngen GmbH • Produktdarstellung und Gestaltung alle Rechte bei W.Söhngen GmbH • Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der W.Söhngen GmbH. Abbildungen können abweichen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der W.Söhngen GmbH. www.soehngen.com/agb